

KONTROLLE

Ihrer orthopädischen Schuhversorgung

Regelmässige Kontrollen von orthopädischen Schuhen sind wichtig für Menschen mit oder ohne Diabetes Mellitus.

Eine Kontrolle umfasst:

Überprüfung
der Passform

Sicherstellung,
dass die Schuhe
korrekt angewendet
und eingesetzt
werden

Überprüfung der
Funktionalität von
orthopädischen
Elementen

Inspektion auf
Abnutzung und
Schäden



Rudolf Jutz OSM
Technische Fussorthopädie AG
Bankstrasse 12
8400 Winterthur

T 052 212 89 87
info@jutz-osm.ch

jutz-osm.ch



**Das Atelier befindet sich im
Haus am Stadtgarten an der
Bankstrasse 12 im 3. Stock.**

Mit dem Auto

Das Auto im Parkhaus Coop/Manor zum Stadtgarten parken. Den Lift Bankstrasse 12 zum 3. Stock benutzen.

Zu Fuss

Eingang links vom Haupteingang unter den Leuchtreklamen, den Lift zum 3. Stock benutzen.



03:24 / 500 / 5-w.ch

TIPPS FÜR IHRE ORTHOPÄDISCHE SCHUHVERSORGUNG



ANGEWÖHNUNG

Ihrer orthopädischen Schuhversorgung

Die Angewöhnung von orthopädischem Schuhwerk ist ein individueller Prozess, der von Fussproblemen, dem Alter und dem täglichen Einsatz abhängt. Hier sind einige wichtige Tipps, die Sie beachten sollten:

Tragen Sie die Schuhe langsam und schrittweise ein.



Beginnen Sie mit kurzen Tragezeiten und steigern Sie diese allmählich.



Achten Sie regelmässig auf Veränderungen oder Druckstellen an Ihren Füssen. Bei ungewöhnlichen Veränderungen bzw. Schmerzen an den Füssen, vereinbaren Sie bitte zeitnah einen Termin zur Optimierung.



Um die bestmögliche Wirkung zu erzielen, sollten die Schuhe nach der Angewöhnung regelmässig getragen werden.



Planen Sie gegebenenfalls eine Folgeversorgung zum richtigen Zeitpunkt ein, z.B. für den Innenbereich, um maximale Ergebnisse zu erzielen.



Da jeder Fuss, jeder Schuh und jeder Patient individuell ist, werden wir bei der Abgabe der Schuhe Ihren persönlichen Angewöhnungsplan besprechen.



PFLEGETIPPS

für Ihre orthopädischen Schuhversorgung

Die richtige Pflege ist essentiell, um die Lebensdauer der Schuhe zu erhöhen und sie in gutem Zustand zu halten. Bei uns finden Sie eine vielfältige Auswahl an Schuhzubehör, darunter Pflege- und Reinigungsmittel. Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite, um das passende Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden.

1 Reinigen Sie Ihre Schuhe regelmässig mit einer weichen Bürste, einem feuchten Tuch und geeigneten Pflegeprodukten.

2 Behandeln Sie die Schuhe regelmässig mit Imprägnierspray, um sie vor Schmutz und Wasser zu schützen. Wir beraten Sie gerne über spezielle Pflege- und Reinigungsmittel.

3 Lassen Sie nasse Schuhe an der Luft trocknen und vermeiden Sie die Nähe von Heizungen oder direkter Sonneneinstrahlung.

4 Wenn Ihre Schuhe abgenutzt sind oder ihre Funktion beeinträchtigt wird, empfiehlt es sich, diese reparieren zu lassen. Dadurch kann die Lebensdauer der Schuhe verlängert und ihre ursprüngliche Funktionalität wiederhergestellt werden.